

INFORMACIÓN IMPORTANTE AL USAR ambIT*

⚠ ADVERTENCIA: Los siguientes síntomas pueden indicar una afección grave. Cierre de inmediato la pinza de la extensión de la bomba y llame a su médico o al 911 en caso de emergencia para evitar lesiones graves al paciente.

- Aumento del dolor
- Fiebre, escalofríos, sudoración
- Cambios en las deposiciones o en la micción
- Dificultad para respirar
- Enrojecimiento, calor, secreción o sangrado excesivo en el sitio del catéter
- Dolor, hinchazón o un moretón grande alrededor del sitio del catéter
- Mareos, aturdimiento
- Visión borrosa
- Zumbido en los oídos
- Sabor metálico en la boca
- Entumecimiento u hormigueo alrededor de la boca, los dedos de las manos o los dedos de los pies
- Somnolencia
- Confusión

Entumecimiento: Tenga en cuenta que puede sufrir pérdida de sensibilidad en la zona quirúrgica y alrededor de ella. Si sufre entumecimiento, tome las medidas adecuadas para evitar lesiones. Tenga cuidado al colocar objetos calientes o fríos en una zona entumecida.

⚠ PRECAUCIONES

- No reutilizar.
- Proteja la bomba y el sitio del catéter del agua de acuerdo con las instrucciones de su médico.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puedo bañarme mientras tengo una bomba de infusión?

Cuando se bañe, coloque la bomba en un lugar seguro cerca de usted, como una bolsa de plástico, para evitar el contacto con el agua.

Mi bomba parece estar funcionando (haciendo ruido) y luego se detiene y está silenciosa. ¿Esto es normal?

Sí. El dispositivo no infunde constantemente, sino que administra la dosis de medicamento que su médico haya programado.

¿Qué significa la luz verde parpadeante del botón de bolo?

La luz verde y la cantidad de infusión que aparecen en la pantalla indican que la bomba está infundiendo correctamente.

¿Aún tiene preguntas?

Los manuales para pacientes se pueden encontrar en www.mypainpump.com. Hay una **línea directa de asistencia para productos disponible las 24 horas** si tiene preguntas sobre su bomba 800-444-2728. Llame a su médico si tiene preguntas médicas y llame al 911 en caso de emergencia.

Consulte la documentación del producto para obtener información completa sobre todas las advertencias, precauciones y contraindicaciones del producto.

AVANOS*

Tratamiento del dolor y recuperación

Para obtener más información, visite: avanospainmanagement.com

Llame al 1-800-448-3569 en los Estados Unidos y Canadá

LA INFORMACIÓN DE SU MÉDICO

Llame a su médico si tiene preguntas médicas:

MÉDICO:

TELÉFONO:

FUERA DEL HORARIO DE ATENCIÓN/FINES DE SEMANA:

Línea directa de asistencia sobre productos las 24 horas: 1-800-444-2728 www.mypainpump.com

Existen riesgos inherentes en todos los dispositivos médicos. Consulte la **documentación** del producto para conocer **las indicaciones, precauciones, advertencias y contraindicaciones**. No seguir las instrucciones de la documentación del producto podría afectar directamente la seguridad del paciente. El médico es responsable de prescribir y administrar los medicamentos según las instrucciones proporcionadas por el fabricante del fármaco. Visite www.avanospainmanagement.com para consultar boletines técnicos adicionales sobre la seguridad del producto.

† Los datos de las afirmaciones están archivados en Avanos. 1 Roberts C, Foster D, Shi G, et al. (2019) A Collaborative Approach to Pain Control Reduces In-hospital Opioid Use and Improves Range of Motion following Total Knee Arthroplasty. *Cureus* 11(5):e4678.

*Marca comercial registrada o marca comercial de Avanos Medical, Inc. o sus filiales. © 2018-2024 AVNS. Todos los derechos reservados. COPIA-06876



BOMBAS DE INFUSIÓN AMBULATORIA

GUÍA DE INFORMACIÓN PARA PACIENTES

Línea directa de asistencia sobre productos las 24 horas: 1-800-444-2728 www.mypainpump.com



AVANOS*

ALIVIO DEL DOLOR DESPUÉS DE LA CIRUGÍA

El alivio del dolor después de la cirugía es una parte importante del proceso de recuperación. Cuando no sienta dolor, tendrá una recuperación más cómoda y volverá a sus actividades normales más rápido.

Opciones de alivio del dolor posquirúrgico

La forma más común de tratar el dolor después de la cirugía es con opioides, como la morfina o la codeína. Estos medicamentos pueden causar efectos secundarios, como dificultad para respirar, estreñimiento, náuseas, vómitos y somnolencia. Los opioides afectan todo el cuerpo y pueden retrasar el proceso de recuperación.

A diferencia de los opioides, los anestésicos locales son medicamentos que adormecen una zona diana. Debido a que no afectan todo el cuerpo, existe un menor riesgo de estos efectos secundarios desagradables.



Sistema de control del dolor ambIT*

La familia de bombas incluye la bomba PIB, PIB/PCA, PCA, Pre-Set, bombas continuas y militares. Vienen en varios colores, como verde azulado, negro, azul, gris, naranja o blanco. Su tipo de bomba para el control del dolor dependerá de su procedimiento y plan de tratamiento indicado por su proveedor.

CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA ambIT

La bomba está conectada a un pequeño catéter (sonda), que le coloca el cirujano o el anestesiólogo. Dependiendo de su procedimiento, el catéter se colocará cerca del lugar de la incisión quirúrgica o debajo de la piel junto a un nervio cercano a la zona quirúrgica.

La bomba electrónica ambIT administra medicamento de forma continua o intermitente a la velocidad programada. Si se lo receta su médico, también puede admitir la capacidad de administrar un bolo de anestesia local para ayudar a satisfacer las necesidades individuales de control del dolor.

BENEFICIOS DE LA BOMBA ambIT



Un estudio clínico ha demostrado que la **bomba ambIT reduce el dolor y el uso de opioides después de la cirugía**¹



Capacidad para ajustar la frecuencia de los medicamentos para satisfacer las necesidades individuales de control del dolor[†]



Controles simples[†]



Pequeña y liviana, lo que permite que los pacientes se muevan mientras se infunde el medicamento[†]



Bolsa de transporte

Bomba reutilizable

Se incluye pero no aparece en la imagen: Manual para pacientes

USO DE LA BOMBA DE INFUSIÓN

Infusión en curso

Una luz de EJECUCIÓN verde parpadeante (dentro del botón de BOLO) y "ml" (volumen infundido) en la pantalla de la bomba indican que la bomba está infundiendo. Si la infusión se pausa, aparece un icono de pausa parpadeante (II) en la pantalla de la bomba y dos pitidos cada cuatro minutos, lo que indica que la infusión de la bomba está en pausa.

Botón de bolo

Cuando se presiona el botón de BOLO durante el modo de ejecución, la bomba administra el bolo programado. Durante la administración del bolo, la luz de ejecución verde (dentro del botón de BOLO) parpadea dos veces.

Infusión finalizada

Una vez finalizada la infusión, la bomba emite un tono largo seguido de tres pitidos cortos, que se repiten cada cuatro minutos. En ese momento se puede apagar la bomba y seguir las instrucciones del médico para completar el tratamiento.

PANTALLA DE LA BOMBA

BOTÓN DE EJECUCIÓN/PAUSA

Inicie, pause o reanude la infusión y silencie las alarmas.

BOTÓN DE BOLO

Administra el bolo programado. (La opción de bolo permite a los pacientes administrar una dosis única de medicamento con solo presionar un botón[†]).

SI LA BOMBA EMITE UNA ALARMA, COMPRUEBE QUE:

- La pinza blanca de la extensión esté abierta (se mueva libremente sobre la extensión).
- La extensión no está torcida.
- El filtro no está sujeto con cinta adhesiva ni cubierto.

